

www.freedom.dk  
**FreeDOMS**

Opbevar kondomer så de ikke udsættes for mekanisk skade, sollys eller høj varme.

FreeDOMS kondomer repræsenterer højeste kvalitet, sikkerhed og komfort. Hvert kondom er elektronisk testet. Kondomer er en effektiv beskyttelse mod graviditet og seksuelt overførte sygdomme. Desværre kan intet præventionsmiddel give 100% beskyttelse. Hvis kondomet går i stykker eller glider af under brug, så søg råd fra din læge.

Ver. xxx220210-01




Kondomet åbnes ved forsigtigt at rive folien over med fingrene.

Pas på negle og brug ikke tænder, saks eller skarpe genstande til at åbne, da det let kan beskadige kondomet. Hold på det lille reservoir mens kondomet sættes på den stive penis. Herved undgås at der dannes en luftlomme i spidsen af kondomet. Kondomet rulles så langt ned som muligt.

Træk penis ud inden den bliver slap. Hold samtidig kondomet på plads, så det ikke glider af, og så der ikke løber sæd ud.

Brug kun kondomet én gang og brug det under hele samlejet.

Ved anvendelse af glidemiddel skal det være vandbaseret.

Indeholder: 1 kondom af naturgummilatex med glidemiddel.  
Med reservoir. Bredde 53 mm. Længde 180 mm.  
ISO 4074  Se kondomfolie  
Europæisk repræsentant:  
Norup Litograf, 1850 Frederiksberg, DK  
LOT  Se kondomfolie  
 0120